



***Red Integrada de
Diagnóstico por Imagen***

Rol Radiólogo

ROL: RADIOLOGO.

Ingresar a Mozilla Firefox. RIDI aparecerá por defecto en las ventanas de inicio. De no ser así, acceder ingresando la dirección en el explorador: <http://10.253.3.24/ris>.

En la pantalla de “Login” debemos ingresar nuestro usuario, el mismo se conforma por la primera letra del nombre y el apellido, todo en minúscula. La contraseña en el primer ingreso es igual al nombre de usuario, la misma debe ser cambiada mediante el botón de “Cambio de Contraseña” y elegir una personal y privada.



Seleccionar el rol de **RADIOLOGO**, seguido de **Continuar**.



Una vez que ingresamos como médico radiólogo obtenemos un listado de pacientes que posee las siguientes características y funciones.



Documento	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	20101211	20101212	Institucion realizadora

En el margen superior izquierdo tenemos el “Nombre de la Institución” para la que estamos visualizando los estudios. Hacia la derecha encontramos la modalidad que visualizamos, la misma se puede filtrar por “todas” es decir veremos las distintas modalidades de imágenes para las cuales realizamos informes. Podemos tener filtrado por modalidad ejemplo; “CT”, “CR”, “US”, u “OT” (en el caso de que solo tengamos la “solicitud” de un estudio sin imágenes adjuntas). Dentro de ese menú existe la posibilidad de desplegar los “estudios personalizados”, es decir, aquellos estudios que se dirigen directamente a un profesional al momento de la recepción, para ello debo colocar el filtro bajo mi nombre y allí aparecerán dichos estudios dirigidos a mi persona.

Por último en el margen superior a la derecha vemos un filtro que nos permite diferenciar el proceso en el cual está el estudio en cuatro grandes grupos: “Ver Todos los estudios”, “Ver Estudios Informados”, “Ver Estudios con Informes para autenticar” y “Ver Estudios no Informados”.

Por debajo de estos menús tenemos una serie de filtros que nos permiten buscar un estudio específico por “Documento”, “Nombre”, “Apellido paterno”, “Apellido materno” o por un rango de “Fechas establecidas”.

Dentro del listado con los pacientes deseados se observan varios íconos, que se detallan a continuación:



Ver series:

Permite abrir el “contenido del estudio del paciente”. Se puede ver la solicitud del estudio y las diferentes series de imágenes realizadas al paciente.



Descargar estudio:

Clickeando este ícono abriremos el visualizador de imágenes Weasis, aceptamos la descarga y abrimos el archivo que se descarga, puede necesitar que aprobemos algunos alertas de seguridad de Java que no tienen ningún riesgo para el sistema, solo aceptamos las mismas para poder continuar.





Ver estudios:

Muestra estudios que se le realizaron al paciente en la propia institución u otras que integran RIDI (desde la implantación del sistema).




Documento	Nombre	Modalidad	Estudio	Fecha Estudio
32245618		OT,CR	RX COLUMNA PANORAMICA	2016-12-12 07:49:44



Editar informe:

Se observa este icono en el caso de que el estudio no haya sido informado aún, o el mismo no lleve el informe. Para ver todos los estudios no informados, se deberá filtrar por dicho modo. También se pueden buscar por los estudios que fueron asignados bajo su nombre.

Para editar el informe se debe clicar el icono y se desplegará una plantilla como se observa a continuación. Aparecerán los datos del paciente y a continuación se deberá seleccionar la modalidad, el procedimiento y el formato.

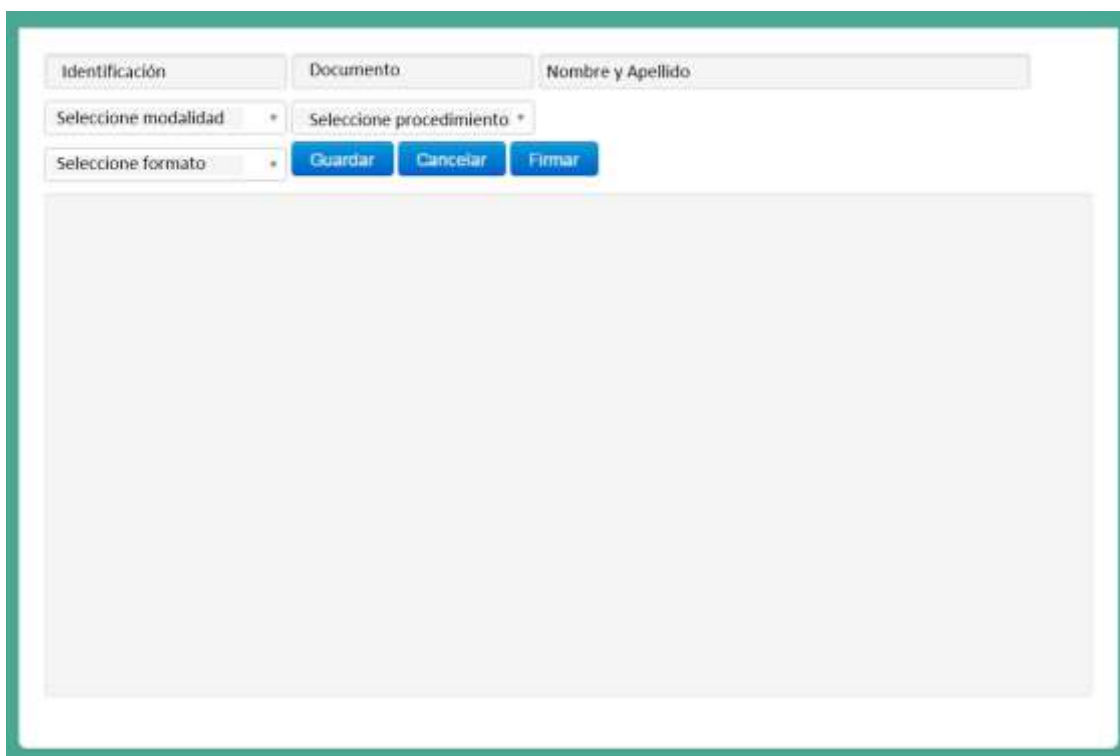


Identificación: Documento: Nombre y Apellido

Seleccione modalidad * Seleccione procedimiento *


Seleccione formato *

Una vez realizado dichos pasos se generará una plantilla que deberá ser completada en mayor o menor medida dependiendo del formato seleccionado.

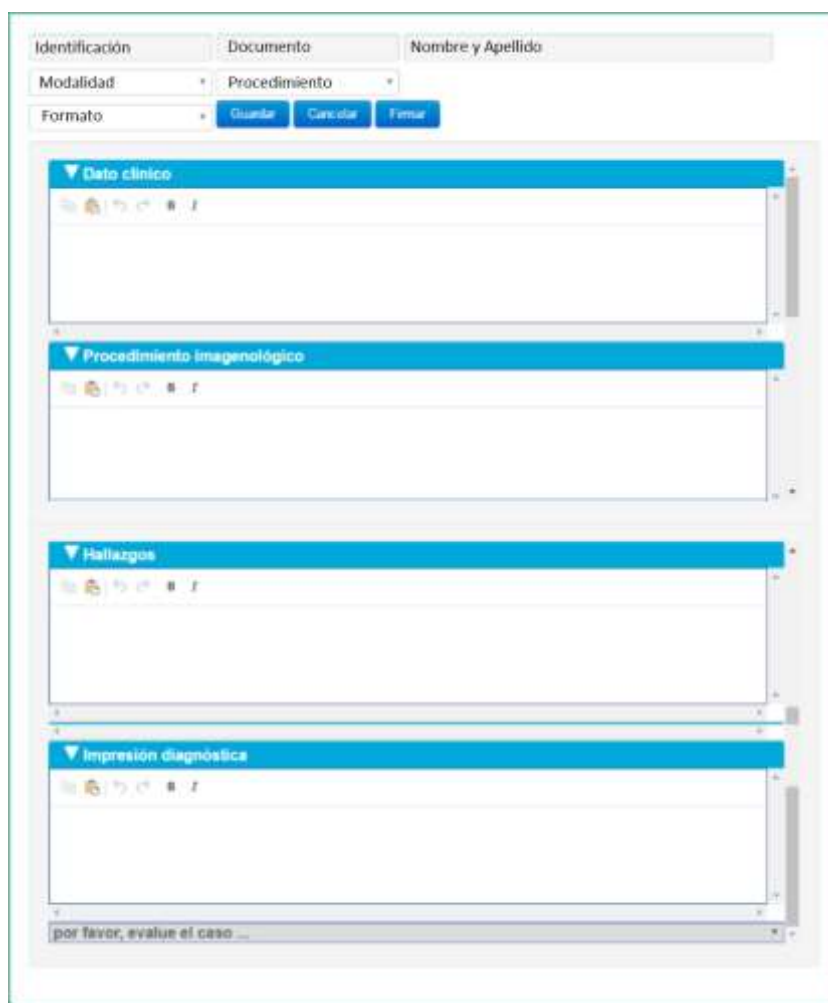

The screenshot shows a web-based form for creating a medical report. At the top, there are input fields for 'Identificación', 'Documento', and 'Nombre y Apellido'. Below these are dropdown menus for 'Modalidad' and 'Procedimiento', and a 'Formato' dropdown. Three buttons are visible: 'Guardar', 'Cancelar', and 'Firmar'. The main body of the form consists of four large text areas, each with a blue header and a toolbar: 'Datos clínico', 'Procedimiento imagenológico', 'Hallazgos', and 'Impresión diagnóstica'. At the bottom, there is a small text prompt: 'por favor, evalúe el caso ...'.

Una vez completado el informe se puede "Guardar" o "Firmar". Para firmarlo se deberá ingresar el usuario y la contraseña, generando un informe para autenticar.

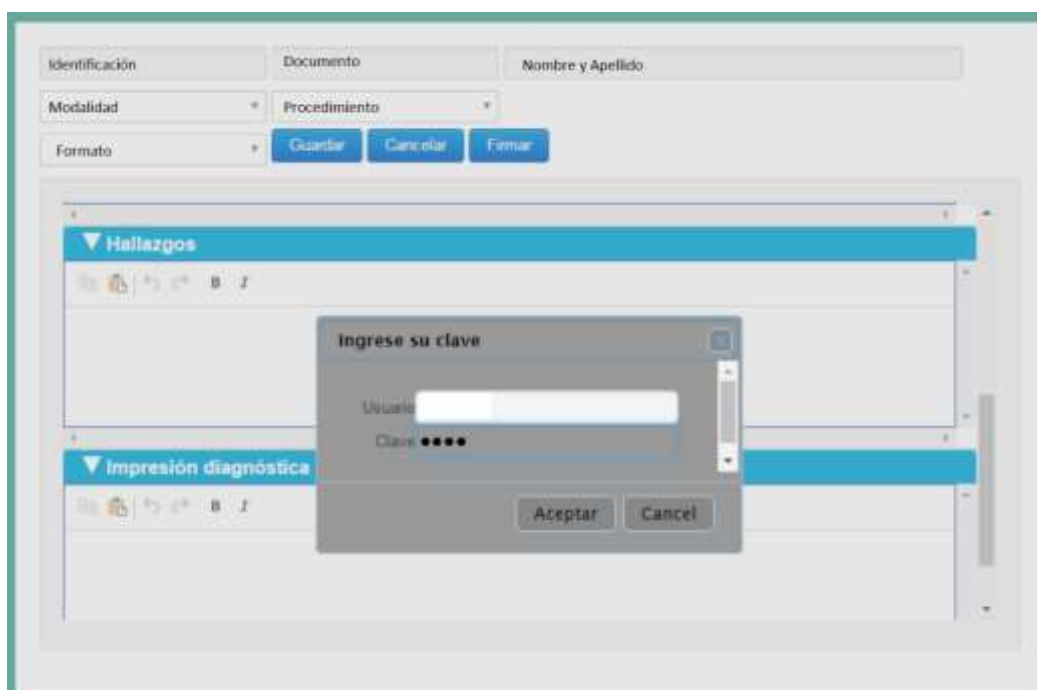

This screenshot shows the same medical report form as above, but with an authentication dialog box overlaid in the center. The dialog box is titled 'Ingreso su clave' and contains two input fields: 'Usuario' and 'Clave'. The 'Clave' field is masked with dots. At the bottom of the dialog box are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'. The background form is partially obscured by the dialog box.




Autenticar:

El informe debe ser autenticado. Se puede filtrar por “Ver estudios con informe por autenticar”.



Aparecerá el icono con el tic que se debe clicar y luego presionar “Aceptar”.

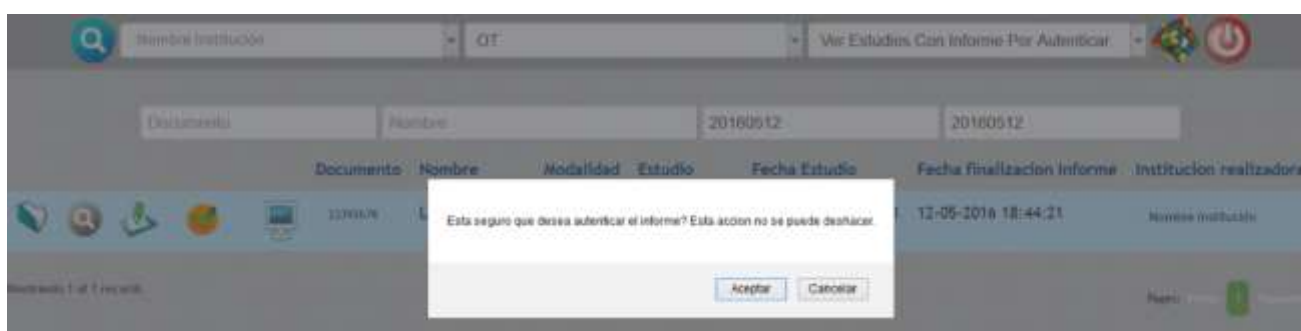

Se creará el documento clínico electrónico (CDA).



Ver informe:

Cuando observamos éste ícono sabremos que el estudio presenta informe de un médico radiólogo. Si cliqueamos sobre él se despliega el Documento Clínico Electrónico (CDA). Si no aparece el icono significa que no hay informe.



Paciente:	Identificación del Paciente:
Fecha de Nacimiento:	Sexo: Femenino
Departamento:	Ciudad:
Institución solicitante: ASSE	Médico solicitante: -
Fecha estudio: 2016-12-08	Servicio: _CT
Estudio: Tomografía - TC COLUMNA LUMBO SACRA	Número acceso: 406228
Prioridad: COORDINADO	Origen: AMBULATORIO

Dato clínico
Lumbalgia intensa de inicio agudo con impotencia funcional y componente nocturno. Descartar hernia de disco.

Procedimiento imagenológico
Se realizó estudio de la columna lumbar sin medio de contraste i/v.

Hallazgos
No se observan alteraciones en la alineación de los cuerpos vertebrales.
Osteopenia difusa.
No se observan pincamientos de los espacios discuales.
Protrusiones discuales circunferenciales a nivel L3-L4 que determina moderado estrechamiento del canal raquídeo y de los neuroforámenes de calibre conservado. Resto del canal raquídeo y de los neuroforámenes de calibre conservado.
Partes blandas paravertebrales sin alteraciones a destacar.

2016-12-08T15:26:17 firmado por Médico **ASSE** OT
Autenticado digitalmente por **ASSE** en fecha del 2016-12-08T15:26:17:03:00 actuando para la institución ASSE Artigas con DDI 2.18.458.0.0.2.1